

# LINGIFLEX

## FRIXIO VG

### LINGETTES À IMPRÉGNER POUR LA DESINFECTION DES SURFACES

ACTIF SUR  
CORONAVIRUS

ALCOOL  
VÉGÉTAL DE  
BETTERAVE



pH 8

► Concept de désinfection des surfaces (boîte rechargeable pour lingettes multiusages) qui combine la lingette avec le ATV Frixio VG (désinfectant spécial COVID-19).

► Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi, laisser imbiber et les lingettes sont prêtes.

► Lingettes multi-usages en polyéthylène et viscosse.

► Alcool végétal issu de la betterave.

► Economique : 1L de produit suffit à imprégner les 80 lingettes.

#### LIEUX D'UTILISATION

Domaine médical / santé / petite enfance : crèches, maisons de retraite, médecins, infirmiers, laboratoire d'analyses, dentistes, centre de soins ou de consultation, ambulanciers, services funéraires, pompiers et services de secours ou d'urgence, kinésithérapie, thalassothérapie.

Vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les élevages.

Industrie agro-alimentaire : ateliers de fabrication, de conditionnement, de préparation de denrées alimentaires, plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, charcuterie, magasin de ventes, hypermarchés, ...

#### NORMES MICROBIOLOGIQUES

Normes désinfectantes à 20°C :

Activité bactéricide : EN 1276 en 1 min.

Activité levuricide : EN 1650 en 15 sec.

Activité virucide : EN 14476 en 30 sec sur *Adénovirus* type 5 et sur *Rotavirus*, en 1 min sur *Coronavirus*.

#### MODE D'EMPLOI

##### 1/ IMPRÉGNATION DU BOBINOT

Ouvrir la boîte et verser le produit ATOUT VERT FRIXIO VG pur sur le bobinot.

Pour une imprégnation optimale du bobinot, il faut verser 1 litre de produit et laisser le papier s'imprégner pendant 15 à 30 minutes.

##### 2/ UTILISATION DES LINGETTES

Lors de la première utilisation, passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule du couvercle puis le refermer. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien refermer l'opercule après chaque utilisation. Un essai préalable est recommandé.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solution d'imprégnation :

Aspect : liquide translucide.

pH : 8 +/-1.

Principe actif : ETHANOL (CAS N° 64-17-5) : 787,2 g/kg. TP1. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Bobinot :

- Non-tissé ultra doux, absorbant et résistant.
- Grande capacité d'absorption.
- Composition : 70% Viscose, 30% Polyester
- Grammage : 50 g/m<sup>2</sup>
- Epaisseur : 0,52 mm
- Technologie : Spunlace
- Couleur : Blanc
- Dimensions : 190 x 300 mm

Dimensions de la boîte : hauteur 235 mm x diamètre 110 mm

#### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT 1060005477555-0820 LINGIFLEX 80F FRIXIO VG

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)